

ANPASSUNG FORMSTABILER SKLERALLINSEN

PFLEGE

- Reinigung mit GP Reiniger
- Abspülen mit physiologischer Kochsalzlösung
- Aufbewahrung mittels wässrigem GP Pflegemittel allenfalls Synergie GP für eine optimale Benetzung. Gut geeignet sind All-in-One Lösungen für weiche Kontaktlinsen oder Peroxidsysteme
- Aufsetzen der Kontaktlinse nur mit physiologischer, unkonserverter Kochsalzlösung (Einmaldosen)
- Monatliche Intensivreinigung

AUFSETZEN DER KONTAKTLINSEN MIT FLUORESCEIN

- Positionieren Sie einen Spiegel flach auf den Tisch
- Die Kontaktlinse zwischen Zeigefinger und Mittelfinger legen und ganz mit physiologischer, unkonserverter Kochsalzlösung (Einmaldosen) auffüllen

- Physiologische, unkonserverte Kochsalzlösung mit Fluorescein einfärben
- Der Linsenträger soll seine Augenlider selbst mit den Fingern offen halten
- Führen Sie die einzusetzende Kontaktlinse waagrecht zum Auge, damit die Flüssigkeit nicht auslaufen kann. Der Linsenträger sollte im Spiegel sein Gegenauge fixieren. Setzen Sie nun die Kontaktlinse von unten auf das Auge des Linsenträgers
- Wichtig, es dürfen nach dem Aufsetzen keine Luftblasen unter der Kontaktlinse sein!
 - Luftblasen können nachträglich nicht herausgedrückt werden
 - Es entstehen visuelle Beeinträchtigungen wenn Luft unter der Kontaktlinse ist
 - Eine Luftblase trocknet das Epithel der Cornea ab. Dem entsprechend verursachen Luftblasen starkes Brennen, rote Augen und Trockenheitsgefühl

ABNEHMEN DER KONTAKTLINSEN

- Massieren und benetzen Sie vor dem Abnehmen der Kontaktlinsen die Augen
 - Den Sauger unterhalb der Pupille positionieren und die Kontaktlinsen in einer Hebelbewegung vom Auge vorsichtig aufwärts abhebeln
 - Alternativ kann die Kontaktlinse auch mittels dem Oberlid herausgedrückt werden (für sehr geübte TrägerInnen)
-

ANPASSUNG

- Aufsetzen der geeignetsten Satz- oder Leihlinsen mit Fluoreszein für die Sitzbeurteilung
- Machen Sie keine Refraktionsänderung unmittelbar nach dem Aufsetzen! Eine Überrefraktion sollte frühestens nach einer Tragezeit von 30 min erfolgen. Unter der Kontaktlinse sollte sich kein Fluoreszein mehr befinden

1. KONTROLLE DER KONTAKTLINSE AUF DEM AUGE:

- Bestimmung der Überrefraktion (beste Sphäre!)
- Gründliche Spaltlampenuntersuchung
- Bindehautgefäße dürfen nicht abgedrückt werden (Blanching)
- Die Kontaktlinse darf nicht bewegen

2. KONTAKTLINSE ABNEHMEN UND NEU MIT FLUORESCEIN AUFSETZEN

- Überbrückung der gesamten Cornea
 - Pupille sollte nur noch leicht durchschimmern!
-

NACHKONTROLLEN

- Nach einer Woche, einem Monat, halbjährlich

1. KONTROLLE DER KONTAKTLINSE AUF DEM AUGE:

- Bestimmung der Überrefraktion (Cylinder!)
- Gründliche Spaltlampenuntersuchung
- Bindehautgefäße dürfen nicht abgedrückt werden (Blanching)
- Die Kontaktlinse darf nicht bewegen

2. KONTAKTLINSE ABNEHMEN UND NEU MIT FLUORESCEIN AUFSETZEN

- Überbrückung der gesamten Cornea
- Pupille sollte nur noch leicht durchschimmern!

- Jährlicher Austausch der Kontaktlinsen