

KONTAKT
FERNE
WERT
MASSKONFEKTION
QUALITÄT
EINZELANFERTIGUNG
FREUDE
VERTRAUEN
KOMFORT
FORMSTABILE
FREIHEIT
FARBEN
WEITE
LEBENSFREUDE
BRILLIANZ
VERSTÄNDNIS
FLEXIBILITÄT
INDIVIDUALITÄT
LEBEN
EINZIGARTIG
FREUDE
SPÜREN
WÜNSCHE
DISTANZ
FREUNDE

KONTAKTLINSEN

HANDHABUNG
FORMSTABILER
KONTAKTLINSEN

falco-linsen.com

falco

ANWENDUNGSGBIET

- Zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten und Optimierung des Sehvermögens am gesunden Auge

ALLGEMEINES

- Waschen und trocknen Sie immer die Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen oder das Auge berühren

GEGENANZEIGEN

- Entzündungen, Infektionen und Reizungen des Auges
- Veränderte Hornhautsensibilität, mangelnder Tränenfluss
- Bei Allgemeinerkrankungen, soweit diese mit einem geschwächten Immunsystem verbunden sind, und bei Liddefekten nur in Abstimmung mit Ihrem Kontaktlinsenanpasser

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

- Um Wechselwirkungen der Kontaktlinsen mit dem Pflegemittel zu vermeiden, sind ausschließlich Pflegesysteme zu verwenden, welche vom Kontaktlinsenanpasser empfohlen wurden bzw. mit den betreffenden Kontaktlinsen kompatibel sind
- Arzneimittel können Veränderungen des Tränenfilms bewirken und die Verträglichkeit der Kontaktlinse beeinflussen

- Teilen Sie Ihrem Kontaktlinsenanpasser mit welche Medikamente Sie verwenden
- Bei Anwendung von Augentropfen sind die entsprechenden Hinweise auf den Packungsbeilagen dieser Präparate zu beachten

NEBENWIRKUNGEN

- Jede Veränderung des Tragekomforts wie übermäßiger Tränenfluss, Rötung des Auges, Sehverschlechterung oder allergische Reaktionen, müssen Sie Ihrem Kontaktlinsenanpasser mitteilen. Unterbleibt dies, können Komplikationen oder Erkrankungen des Auges zu Schäden führen.

BESONDERE HINWEISE

- Der Kontaktlinsenanpasser muss regelmäßig zur Prüfung der Kontaktlinse(n) aufgesucht werden
- Die Kontaktlinsen müssen entsprechend der jeweiligen Anweisung stets sorgfältig gereinigt und gepflegt werden
- Spülen Sie Ihre Kontaktlinse und den Behälter nicht mit Leitungswasser ab
- Die empfohlenen Tragezeiten der Kontaktlinse dürfen nicht überschritten werden
- Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht während dem Schlafen, es sei denn, Ihr Anpasser oder Augenarzt hat Ihnen dazu geraten
- Bei auftretenden Augenreizungen sind die Kontaktlinsen sofort abzusetzen und Ihr Anpasser aufzusuchen
- Verwenden Sie keine beschädigten Kontaktlinsen

V1.0

falco