

HANDHABUNG UND PFLEGE VON SKLERALLINSEN

ALLES
WIRD
GUT.

falco-linsen.com

falco

HANDHABUNG VON SKLERALLINSEN

AUFSETZEN DER KONTAKTLINSE

1. Positionieren Sie einen Spiegel flach auf einem Tisch.
2. Waschen und trocknen Sie immer die Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen oder das Auge berühren.
3. Legen Sie die Kontaktlinsen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und füllen Sie diese ganz mit physiologischer, unkonservierter Kochsalzlösung (Einmaldosen) auf.
4. Mit der anderen Hand greifen Sie von oben über die Stirn, ziehen mit den Fingern das Oberlid mit den Wimpern nach oben und halten es fest. Jetzt nähern Sie sich mit der Kontaktlinse dem Auge, ziehen mit dem Ringfinger dieser Hand das Unterlid nach unten und setzen Sie Kontaktlinse direkt auf das Auge.
5. Führen Sie die Kontaktlinse waagrecht zum Auge, damit die eingefüllte Flüssigkeit nicht auslaufen kann. Fixieren Sie dabei das Gegenauge im Spiegel.
6. Wichtig: Es dürfen nach dem Aufsetzen keine Luftblasen unter der Kontaktlinse sein!

ABNEHMEN DER KONTAKTLINSE

1. Massieren und benetzen Sie vor dem Abnehmen der Kontaktlinse Ihre Augen mit Kochsalzlösung oder Nachbenetzungstropfen.
2. Positionieren Sie den Sauger unterhalb der Pupille auf der Kontaktlinse und hebeln Sie die Linse mit einer Aufwärtsbewegung vom Auge ab.
3. Alternativ kann die Kontaktlinse auch mittels den Lidern herausgedrückt werden.

PFLEGEHINWEISE ZU SKLERALLINSEN

HYGIENE

1. Waschen und trocknen Sie immer die Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen oder das Auge berühren.
2. Lagern Sie die Kontaktlinsen nur in dem dafür vorgesehenen Behälter.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Verwenden Sie nach dem Absetzen der Kontaktlinsen den empfohlenen Kontaktlinsenreiniger nach Anleitung.
2. Spülen Sie die Kontaktlinse anschließend zwischen den Fingern gründlich mit physiologischer Kochsalzlösung ab, legen Sie die Linse in den Behälter und füllen Sie diesen mit der empfohlenen Aufbewahrungsflüssigkeit auf.
3. Die Aufbewahrungsflüssigkeit täglich erneuern.
4. Den Kontaktlinsenbehälter täglich mit einem Papiertuch ausreiben.
5. Es ist empfehlenswert die Kontaktlinsen regelmäßig einer zusätzlichen Intensiv-Reinigung zu unterziehen.

PFLEGEPRODUKTE

1. Wechseln Sie die Pflegemittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Anpasser.
2. Achten Sie auf die Ablaufdaten und Aufbrauchfristen der Pflegemittel.
3. Ihr Kontaktlinsenspezialist empfiehlt Ihnen folgende Produkte zur täglichen Kontaktlinsenpflege:

Reinigen

Aufbewahren

Aufsetzen

falco