

# GEPRÜFTE PFLEGEMITTEL ZUR TANGIBLE HYDRA-PEG BESCHICHTUNG

Folgende Pflegemittel wurden geprüft und als **UNGEEIGNET** eingestuft:



## **ALKOHOLHALTIGE REINIGER:**

Oté Clean  
Contopharma i-clean! Alcohol Cleaner  
Miraflo Cleaner und vergleichbare Produkte

## **ABRASIVE REINIGER:**

Boston Advance

## **DIVERSE:**

Progent  
Oté Twins Active  
Boston One Step Liquid Enzymatic  
Boston Lab Cleaner

## **KEIN LEITUNGSWASSER!**

Durch Leitungswasser kann es zu schädlichen Infektionen kommen und Verunreinigungen verletzen die Oberfläche der Kontaktlinse.

Reiben Sie die Linsen nie trocken oder mit einem Tuch ab. Dies hinterlässt Schäden auf der Kontaktlinsen-Oberfläche und der Tangible HYDRA-PEG Beschichtung.

Bewahren Sie beschichtete Linsen nie trocken auf, sondern nur in einer zugelassenen Aufbewahrungslösung und nach deren Vorschrift.

Weitere Handhabungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der Broschüre, welche bei jeder Lieferung beigelegt wird. Weitere Exemplare können Sie jederzeit anfordern.

Die Liste der geprüften Pflegemittel ist nicht abschliessend und wird laufend erweitert.

Wir empfehlen die Linsen in der täglichen Reinigung nur mit den folgenden geprüften Produkten zu reinigen:



## **MULTIPURPOSE SOLUTIONS:**

Menicare Pure  
Biloplus  
Oté Fine  
Oté Clean All in One  
Total Care Cleaner  
Total Care Disinfection/Storage  
GP Multi  
Clears  
Clearsol  
Topocare GP Sensitiv  
Sichtbar Besser  
GPHCL  
Conventional Reiniger/Abspülung

## **PEROXIDREINIGER:**

Clear Care®  
Clear Care® Plus mit HydraGlyde®  
AO Sept® Plus  
Ao Sept® Plus mit HydraGlyde®  
Refine One Step

## **ENZYMREINIGER:**

Concare Light Enzymtabletten  
Aniclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets

TANGIBLE  
HYDRA-PEG  
BESCHICHTUNG

falco-linsen.com

falco