

# LENTILLES DE CONTACT

CONTACT  
AU LOIN  
VALEUR  
SUR MESURE  
QUALITÉ  
PIÈCE UNIQUE  
JOIE  
CONFIANCE  
CONFORT  
RIGIDES  
LIBERTÉ  
COULEURS  
ÉTENDUE  
JOIE DE VIVRE  
NETTETÉ  
COMPRÉHENSION  
FLEXIBILITÉ  
INDIVIDUALITÉ  
SENSATION  
VIVRE  
UNIQUE EN SON GENRE  
PLAISIR  
SOUHAITS  
DISTANCE  
AMIS

UTILISATION DES  
LENTILLES DE  
CONTACT RIGIDES

[falco-linsen.com](http://falco-linsen.com)

**falco**

### CHAMP D'APPLICATION

- Pour corriger la vue et optimiser la vision de l'œil sain

### GÉNÉRALITÉS

- Lavez-vous et séchez-vous toujours les mains avant de toucher vos lentilles de contact ou l'œil

### CONTRE-INDICATIONS

- Inflammations, infections et irritations des yeux
- Modification de la sensibilité de la cornée, pas de larmoiement
- En cas de maladies générales, dans la mesure où celles-ci sont associées à un système immunitaire affaibli, et en cas de problèmes de paupières, uniquement en concertation avec votre opticien ou praticien

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

- Pour éviter toute interaction des lentilles de contact avec le produit d'entretien, il convient d'utiliser uniquement des systèmes d'entretien qui ont été recommandés par l'opticien ou le praticien resp. qui sont compatibles avec les lentilles de contact concernées
- Les médicaments peuvent provoquer des changements du film lacrymal et influencer la tolérance concernant les lentilles de contact
- Indiquez à votre opticien ou praticien les médicaments que vous prenez

- En cas d'utilisation de gouttes pour les yeux, les remarques correspondantes figurant sur la notice d'emballage de ces préparations sont à observer

### EFFETS SECONDAIRES

- Vous devez faire part, à votre opticien ou praticien, de toute modification du confort lors du port des lentilles, comme le larmoiement excessif, des rougeurs de l'œil, une détérioration de la vue ou des réactions allergiques. En cas d'omission, ceci peut entraîner des complications ou des maladies oculaires.

### REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'opticien ou le praticien doit être régulièrement consulté pour vérifier la/les lentille/s de contact
- Les lentilles de contact doivent toujours être nettoyées et entretenues soigneusement conformément aux consignes respectives
- Ne rincez ni vos lentilles de contact ni le boîtier sous l'eau du robinet
- Les durées recommandées de port des lentilles de contact ne peuvent pas être dépassées
- Ne portez pas vos lentilles de contact pendant votre sommeil, à moins que votre opticien ou votre ophtalmologue ne vous l'ait recommandé
- En cas d'irritations des yeux, il faut retirer immédiatement les lentilles de contact et consulter votre opticien ou praticien
- N'utilisez aucune lentille de contact endommagée

V1.0

falco