

CONTACTO
DISTANZA
VALORE
SU MISURA
PERSONALIZZATO
PIACERE
FIDUCIA
COMFORT
LIBERTÀ
COLORI
AMPIEZZA
GIOIA DI VIVERE

LENTI A CONTATTO

BRILLANTEZZA
COMPRESIONE
UNICO
FLESSIBILITÀ
INDIVIDUALITÀ

VITA
SENTIRE
PIACERE
DESIDERICI
DISTANZA
AMICI

MANEGGIAMENTO
LENTI
SEMIRIGIDE

falco-linsen.com



CAMPO D'IMPIEGO

- Per la correzione di disturbi visivi e l'ottimizzazione della facoltà visiva di un occhio sano

IN GENERALE

- Lavarsi e asciugarsi sempre le mani prima di toccare occhio o lente a contatto

CONTROINDICAZIONI

- Infiammazioni, infezioni e irritazioni dell'occhio
- Cambiamento della sensibilità della cornea, mancanza di lacrimazione
- In caso di patologie sistemiche, per quanto queste siano legate a un sistema immunitario indebolito e in caso di difetti delle palpebre solo in consulenza del suo ottico specializzato in lenti a contatto

INTERAZIONI CON ALTRI LIQUIDI

- Per evitare interazioni delle lenti a contatto con prodotti per la cura delle lenti, vanno usati esclusivamente prodotti consigliati dall'ottico specializzato in lenti a contatto o prodotti compatibili con le lenti in questione
- Farmaci possono provocare un cambiamento del film lacrimale e influenzare la tollerabilità delle lenti a contatto

- Informi il suo adattatore lenti a contatto di quale farmaci fa uso
- In caso dell'impiego di colliri, mantenersi alle istruzioni per l'uso

EFFETTI COLLATERALI

- Ogni cambiamento di comfort, come flusso lacrimale eccessivo, rossore dell'occhio, peggioramento della vista o reazioni allergiche vanno comunicate all'adattatore lenti a contatto. In mancanza di ciò, complicazioni o malattie dell'occhio possono provocare danni.

NOTE SPECIALI

- Bisogna fare dei regolari controlli della/e lente/i a contatto presso il proprio adattatore.
- Le lenti a contatto vanno sempre pulite e curate con cura secondo le indicazioni.
- Non risciacqui mai le lenti a contatto e il contenitore sotto l'acqua del rubinetto.
- Le ore consigliate dell'utilizzo delle lenti non devono mai venir sorpassate.
- Non porti mai le sue lenti a contatto mentre dorme, a meno ch , le   stato consigliato dal suo adattatore lenti a contatto o dall'oculista.
- Con l'insorgere di irritazioni agli occhi, smettere subito di portare le lenti a contatto e visitare il suo adattatore lenti a contatto.
- Non portare mai lenti a contatto difettose.

V1.0

falco