

GEPRÜFTE PFLEGEMITTEL ZUR TANGIBLE HYDRA-PEG™ BESCHICHTUNG

Folgende Pflegemittel wurden geprüft und als **UNGEEIGNET** eingestuft:



ALKOHOLHALTIGE REINIGER:

Contopharma i-clean! Alcohol Cleaner
Miraflow Cleaner und vergleichbare
Produkte

ABRASIVE REINIGER:

Boston Advance

DIVERSE:

Progent
Oté Twins Active
Boston One Step Liquid Enzymatic
Boston Lab Cleaner

KEIN LEITUNGSWASSER!

Durch Leitungswasser kann es zu schädlichen Infektionen kommen und Verunreinigungen verletzen die Oberfläche der Kontaktlinse.

Reiben Sie die Linsen nie trocken oder mit einem Tuch ab. Dies hinterlässt Schäden auf der Kontaktlinsen-Oberfläche und der Tangible HYDRA-PEG™ Beschichtung.

Bewahren Sie beschichtete Linsen nie trocken auf, sondern nur in einer zugelassenen Aufbewahrungslösung und nach deren Vorschrift.

Weitere Handhabungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der Broschüre, welche bei jeder Lieferung beigelegt wird. Weitere Exemplare können Sie jederzeit anfordern.

Die Liste der geprüften Pflegemittel ist nicht abschliessend und wird laufend erweitert.

Wir empfehlen die Linsen in der täglichen Reinigung nur mit den folgenden geprüften Produkten zu reinigen:



MULTIPURPOSE SOLUTIONS:

Oté Clean
Menicare Pure
Biloplus
Oté Fine
Oté Clean All in One
Total Care Cleaner
Total Care Disinfection/Storage
GP Multi
Clears
Clearsol
Topocare GP Sensitiv
Sichtbar Besser
GPHCL
Conventional Reiniger/Abspülung

PEROXIDREINIGER:

Clear Care®
Clear Care® Plus mit HydraGlyde®
AO Sept® Plus
Ao Sept® Plus mit HydraGlyde®
Refine One Step

ENZYMREINIGER:

Concare Light Enzymtabletten
Aniclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets

TANGIBLE
HYDRA-PEG™
BESCHICHTUNG

falco-linsen.com

falco