

DE INFORMATION
— Irisprint Kontaktlinsen



Name und Adresse des Herstellers
 Falco Linsen AG
 Talackerstrasse 14
 CH-8274 Tägerwilen
 +41 71 666 70 40
 Schweiz



Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf weder grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschließlich insbesondere in Form von Fotokopien, Aufnahmen, Informationsspeicherung und -verarbeitung in Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Hersteller vervielfältigt, übermittelt, übertragen, verteilt, geändert, zusammengefasst oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Kopien von der Systemsoftware sind unzulässig.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Alle Rechte vorbehalten.





WICHTIG: Bitte lesen Sie das gesamte Dokument durch, bevor Sie eines der Produkte anwenden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zweckbestimmung
- 2 Vorsichtsmassnahmen in der Anwendung
- 3 Diverses

Verwendete Symbole:

Symbol:	Erklärung:
	Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“
	Symbol für „Achtung“

Symbole sind der EN ISO 15223-1:2017 entnommen.



Ihre Kontaktlinse enthält einen individuellen, handgefertigten Irisprint. Bitte beachten Sie folgende ergänzende Punkte zur beiliegenden Gebrauchsanweisung.

1 Zweckbestimmung

Indikationen:

Wiederherstellung defekter Bulbusabschnitte

- Iris bei Iriskolobom, kongenitaler oder traumatischer Mydriasis, Albinismus
- Irislinse bei trüber Hornhaut

Kosmetische Indikationen:

- durch Unfall oder Krankheit entstellte Iris abdecken

2 Vorsichtsmassnahmen in der Anwendung

- Bevor Sie sich mit Ihrer Irisprint-Kontaktlinse im Strassenverkehr bewegen, muss der Anpasser (dipl. Augenoptiker, Optometrist, Augenarzt) die Verkehrstauglichkeit überprüfen (Lochblendeneffekt).
- Bei Fremdkörpergefühl, Reizung, Rötung des Auges und/ oder übermässigem Tränenfluss beachten Sie in der Gebrauchsanweisung den Hinweis beim Kapitel 7.1
- Verwenden Sie keine Intensivreiniger, der Irisprint kann dadurch matt werden.

3 Diverses

Jeder Irisprint ist ein Unikat. Durch die individuelle Handanfertigung unterliegt die Struktur und Farbgebung leichten Variationen.

Für eine vergrösserte Darstellung der Schrift empfehlen wir die digitale Version auf unserer Webseite.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für beiderlei Geschlecht.

Stand: 2020-02-15, Version 3